

INSTRUCTIES MONDNEUSMASKERS VOOR BEZOEKERS

Binnen Markenheem is het gebruik van chirurgische / medische mondneusmaskers verplicht.



Markenheem verstrekt de maskers gratis bij de hoofdingang.

HET MONDNEUSMASKER OPZETTEN

1

Desinfecteer de handen

2

Haal het masker uit de doos

3

Zet het masker op met behulp van de oorkluisen

4

Trek de bovenkant over je neus en druk de neusklem aan

5

Trek de onderkant onder je kin, zodat het rondom goed aansluit

HET MONDNEUSMASKER AFZETTEN

1

Trek achter je oren de elastieken iets naar achteren, opzij en vervolgens naar voren

2

Je houdt het masker vast aan het elastiek

3

Gooi het masker weg in een afvalbak met deksel en voetpedaal (gebruik dus het voetpedaal)

4

Pak het masker NOOIT aan de voorzijde vast, deze kan besmet zijn

5

Desinfecteer je handen